



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Afastador Goldfinger VETECH



Fabricante:

MRER IND. BIOMECANICA LTDA - CNPJ 71.869.648/0001-47

Av. M-17, nº 370 - Vila Martins

Rio Claro - SP - CEP 13505-150

Responsável Técnico: Vitor Murilo Magalhães Reis

CREA: 5062609246

Registro ANVISA: 81049370006

Fone: (19) 3534-0136

www.vetech.med.br

Produto destinado a cirurgias laparoscópicas.

INTRODUÇÃO

O AFASTADOR GOLDFINGER VETECH, suas partes fixas e móveis são produzidas em metal de grande resistência (aço inoxidável 304 e duralumínio 7075) e com dimensional controlado, o que minimiza o atrito, garantindo precisão e mantendo a robustez por toda sua vida útil.


Descrição do Produto e Formas de Apresentação ao Mercado

O AFASTADOR GOLDFINGER VETECH é totalmente produzido no Brasil, com cabo em Duralumínio anodizado, rosca dupla e cabo de aço reforçado. Disponível em 5 variações de pontas: **Curva, Redonda, Concha, Triângulo e Gancho**.

O Afastador Goldfinger é fornecida em caixa de papelão branco dupla onda, envolto em plástico bolha para proteção contra batidas no transporte.

Diferenças entre os Modelos e Suas Aplicações e Materiais

Todos os modelos têm sua estrutura semelhante, mesmo processo produtivo (usinagem de precisão e montagem), mesmo material, diferenciando-se, na extremidade da ponta, conforme tabela abaixo:

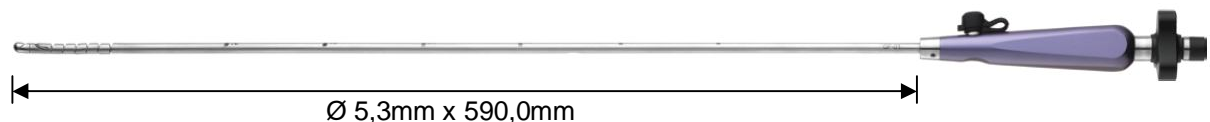

Variações:



Curva



Gancho



Redonda



Triangular

Uso do Produto

Esses elementos mecânicos servem para afastar os tecidos seccionados ou separados, expondo os planos anatômicos ou órgãos subjacentes para propiciar o desenvolvimento de determinado ato operatório. São classificados como de tração manual, contínua ou auto-estáticos. Os afastadores auto-estáticos são compostos de peças acopladas entre si, de tal modo que uma vez colocados e abertos, eles se mantêm estáveis. São aplicados em posição fechada nas bordas da ferida, tendo um ou mais pontos de apoio de cada lado.

São usados também como dissector endoscópico e sistema de remoção de banda gástrica destinando-se a utilização em procedimentos laparoscópicos para dissecação romba entre camadas de tecido, para puxar os fios das suturas, para puxar tubos e para auxiliar, em geral, na colocação de uma banda gástrica.

Precauções ao Usar:

O AFASTADOR GOLDFINGER só deve ser manipulado por pessoa habilitada (médico). Treinado na técnica cirúrgica.

Verificar a integridade do Afastador antes do uso, observando eventuais danos mecânicos (torto, amassado ou quebrado).

Cuidados Especiais no Manuseio do Afastador Goldfinger:

A embalagem interna grau cirúrgico só dever ser violada momentos antes do procedimento.

Restrições Importantes de Uso:

Não utilize o Afastador que apresente violação de embalagem após autoclave;

Não utilize se estiver em mau estado (torto ou quebrado);

Não utilize o Afastador Goldfinger se o mesmo não estiver em condições de uso.

Descarte:

O AFASTADOR GOLDFINGER DEVERÁ SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE APÓS A CIRURGIA. É DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL A LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO ADEQUADA DO INSTRUMENTAL.

Armazenamento e Transporte

- O Afastador Goldfinger deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- Estocar em local fresco e seco, distante de poeira e umidade.
- Condições ambientais:
- Temperatura: 10 °C a 30 °C.
- Umidade Relativa: 30% a 75%;
- Pressão Atmosférica: 700hPa a 1060hPa.

RASTREABILIDADE

O AFASTADOR GOLDFINGER VETECH possui lotes que possibilitam seu rastreamento e o seu destino final caso seja necessário.

GARANTIA

O AFASTADOR GOLDFINGER VETECH possui garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. A garantia NÃO se aplica a mal uso, erro no procedimento e quedas acidentais.

A garantia será cancelada caso o instrumental passe por manutenção preventiva efetuada por uma empresa terceira que não seja a VETECH nem tampouco tenha autorização por escrito para efetuar o serviço.