



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Clipador VETECH



Fabricante:

MRER IND. BIOMECANICA LTDA - CNPJ 71.869.648/0001-47

Av. M-17, nº 370 - Vila Martins

Rio Claro - SP - CEP 13505-150

Responsável Técnico: Vitor Murilo Magalhães Reis

CREA: 5062609246

Registro ANVISA: 81049370001

Fone: (19) 3534-0136

www.vetech.med.br

Produto destinado a **cirurgia laparoscópicas.**

INTRODUÇÃO


O CLIPADOR VETECH é um aplicador de cliques endoscópico, no procedimento de cirurgias. Suas partes fixas e móveis são produzidas em metal de grande resistência (aço inoxidável 304 e 420 BC) e com dimensional controlado, o que minimiza o atrito, garantindo precisão e mantendo-se a robustez por toda sua vida útil.

Descrição do Produto e Formas de Apresentação ao Mercado

O CLIPADOR VETECH é composto com um cabo ergonômico, totalmente desmontável. Disponível para cliques de titânio pequeno, médio e grande, padrão LT. O Clipador é fornecido em caixa de papelão branco dupla onda, envolto em plástico bolha para proteção contra batidas no transporte.

Diferenças entre os Modelos e Suas Aplicações e Materiais

Todos os modelos têm sua estrutura semelhante, mesmo processo produtivo (usinagem de precisão e montagem), mesmo material, conforme figura abaixo:

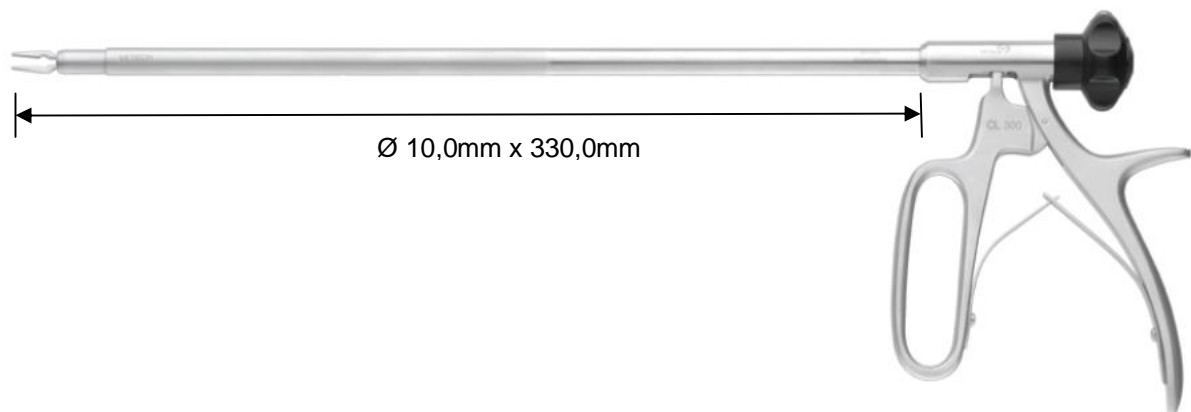

Variação:



PONTA LT-300

Uso do Produto

É um clipador usado para fechamento de vasos ou outras estruturas tubulares e para vagotomia, simpatectomia e marcação radiográfica. Consiste em uma haste aplicadora com cabos moveis e fixos, sendo que o cartucho contém de 05 a 10 cliques de titânio, vendidos separadamente. As garras do clipador são colocadas ao redor do vaso ou de outra estrutura tubular. O clipe é fechado apertando-se os cabos do aplicador, o que fecha o vaso ou a estrutura. Um novo clipe é carregado manualmente para a garra do clipador quando os cabos estão na posição normal.

Precauções ao Usar:

O Clipador só deve ser manipulado por pessoa habilitada (médico) treinado na técnica cirúrgica.

Verificar a integridade do Clipador antes do uso, observando eventuais danos mecânicos (torto, amassado, quebrado ou desalinhado).

Cuidados Especiais no Manuseio do Clipador:

A embalagem interna grau cirúrgico só deve ser violada momentos antes do procedimento;

Restrições Importantes de Uso:

Não utilize o Clipador que apresente violação de embalagem;

Não utilize cliques em mau estado (tortos ou quebrados);

Descarte:

Os cliques, após o uso, **devem ser descartados** junto com o **lixo contaminado**. **Não podem ser reutilizados**, portanto, esse material é de uso único. O clipe não PE de responsabilidade da VETECH quanto a qualidade e procedência do mesmo.

O CLIPADOR DEVERÁ SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE APÓS A CIRURGIA. É DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL A LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO ADEQUADA DO INSTRUMENTAL.

Armazenamento e Transporte

- O Clipador deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- Estocar em local fresco e seco, distante de poeira e umidade.
- Condições ambientais:
- Temperatura: 10 °C a 30 °C.
- Umidade Relativa: 30% a 75%;
- Pressão Atmosférica: 700hPa a 1060hPa.

RASTREABILIDADE

O CLIPADOR VETECH possui lotes que possibilitam seu rastreamento e o seu destino final caso seja necessário.

GARANTIA

O CLIPADOR VETECH possui garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. A garantia NÃO se aplica a mal uso, erro no procedimento e quedas acidentais.

A garantia será cancelada caso o instrumental passe por manutenção preventiva efetuada por uma empresa terceira que não seja a VETECH nem tampouco tenha autorização por escrito para efetuar o serviço.